

# DESIFOR-ONE

## multi wipes

### Verkaufseinheiten

Softpack à 100 Tücher

### Art.-Nr.

20490



### Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro-, und Adenoviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Gebrauchsfertige Tücher (EN 16615, 4-Felder-Test)
- Tuchgröße 20x20 cm, Tuchqualität 50 g/m<sup>2</sup>
- IHO-gelistet
- HACCP-konform



### Anwendungsbereich

Zur rückstandsfreien Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im medizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

### Anwendungsanleitung

Zu desinfizierende, saubere Fläche mit dem getränktem Tuch gründlich wischen und abtrocknen lassen. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten.

### Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	100 %	1 min	EN 16615 (niedrige Belastung) VAH (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	100 %	15 min	EN 14348 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	100 %	15 s	DVV/RKI-Leitlinie (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid PLUS	100 %	15 min	EN 14476 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Polyomaviren (SV 40)	100 %	15 s	DVV/RKI-Leitlinie (hohe Belastung)

### Wirkstoffe

100 g Wirkstofflösung enthalten 17,4 g Propan-2-ol; 12,6 g Ethanol (94 % w/w)

BAuA Reg.-Nr. N-70789 N-70790

CE 0297

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Anwendungshinweise

- Gebrauchte Tücher fachgerecht entsorgen, nicht in die Toilette werfen.
- Reichweite pro Tuch ist abhängig von der Oberflächenstruktur, ca. 0,5 m<sup>2</sup>.
- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 28 Tage.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

## Umgangshinweise

- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 15°C bis 25°C
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitze einwirkung

## Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos

Dichte: 0 g/cm<sup>3</sup>  
GISCODE: GDOpH conc 

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

## Kennzeichnung



## Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:<https://www.dr-schnell.com/desifor-one-multi-wipes>

DE 250412