

DESIFOR-QUICK PLUS

Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter

Art.-Nr.

00523



Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- IHO-gelistet
- HACCP-konform



Anwendungsbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im öffentlichen Bereich, Lebensmittelbereich und humanmedizinischen Bereich.

Anwendungsanleitung

Zu desinfizierende, gereinigte Flächen vollständig mit konzentriertem DESIFOR-QUICK PLUS benetzen und abtrocknen lassen. Einwirkzeiten beachten.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	100 %	5 min	EN 13697 (hohe Belastung) EN 16615 (hohe Belastung) VAH (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	100 %	30 s	EN 14348 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	100 %	1 min	EN 14348 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	100 %	1 min	EN 14476 (niedrige Belastung) EN 16777 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid PLUS	100 %	5 min	EN 14476 (niedrige Belastung) EN 16777 (niedrige Belastung)

Wirkstoffe

100 g enthalten 45,0 g Ethanol

BAuA Reg.-Nr. N-22859 N-22860

BAG Reg.-Nr. CHZN1998

CE 0482

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungshinweise

- Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas/Plexiglas.
- Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 0°C bis 30°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos

Dichte: 0,92 g/ml
GISCODE: GDOpH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung



Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/desifor-quick-plus>

DE 250412