

FORMADES

FLÄCHENDESINFEKTION



HACCP-konform

begrenzt viruzid PLUS



FORTE

Flüssiges Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion

- frei von Aldehyden
- frei von Duft- und Farbstoffen
- exzellente Reinigungseigenschaften
- Anwendung auch mit dem FORMADES Vliestuch-Spendersystem
- Medizinprodukt (D/A/CH)

Einsatzbereich

Gemäß MPG: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten. Gemäß Biozidprodukte-VO: Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art.

Anwendung

Zur Desinfektion Oberfläche miteinander ausreichenden Menge Lösung FORMADES FORTE benetzen und mechanisch (Scheuer-Wischmethode) verteilen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser spülen. FORMADES FORTE ist zur Verwendung mit geprüften Vliestuchspendersystemen geeignet.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
bakterizid, levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen)	0,5 % 15 Min.	EN 13697, Hohe Belastung
bakterizid, levurozid (Humanmedizinischer Bereich)	0,5 % 15 Min.	EN 13727, EN 13624, niedrige Belastung; EN 16615, hohe Belastung mit Mechanik
Tuberkulozid (M. terrae)	0,5 % 60 Min.	EN 14348, niedrige Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,5 % 15 Min.	DVV/RKI-Leitlinie
begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV) und Noro-, Adeno- und Rota-Viren	2% 30 Min	EN 14476, niedrige Belastung
Noroviren (MNV)	1,5 % 15 Min.	EN 14476, hohe Belastung
Rotaviren	0,5 % 15 Min.	EN 14476, niedrige Belastung
Polyomaviren (Papovavirus SV 40)	1,0 % 15 Min.	EN 14476, hohe Belastung

Wirkstoffe

100 g enthalten:
 10,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid;
 6,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung
 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05, GHS07, GHS09

Hinweise

Produkt nicht für Oberflächen geeignet, die Polycarbonat enthalten (z.B. Schutzbrillen). Produkt nicht für die Anwendung auf semikritischen Medizinprodukten geeignet.

Standzeit in Vliestuchsystemen: 28 Tage
 Haltbarkeit geschlossenen: siehe Etikett
 Haltbarkeit geöffnet: 12 Monate

Gebinde	Inhalt	VE	Art.Nr.	PZN
Dosierflasche	1 Liter	9	65732	16928885
Kanister	5 Liter	1	65730	16928922

BAuA-Reg. Nr. N-97362

pH **CE 0124 MD**

Stand 01/2022

Alle Angaben unserer Produktdatenblätter entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Weitere Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Vertrieb durch:



D/A: unizell Medicare GmbH
 Pohnsdorfer Str. 3
 23611 Bad Schwartau

Telefon: 0451 - 39 89 00
 Telefax: 0451 - 39 39 93
 E-mail: info@unizell.de

CH: Praximedico AG
 Bleichelstraße 22
 9055 Bühler AR

PRISMAN GmbH
 Otto-Hahn-Ring 6-18
 64653 Lorsch
 Tel.: +49 (0) 6251 866980-0